



# スキャン計画に役立つ機能 Scan Plan

画面左下に表示されている[Scan Plan]  というアイコンは、スキャノを撮り直す際に使用していただくことが多いかと思いますが、スキャン計画中・後にも使用できるようになっています。今回はこの[Scan Plan]の機能の概要をご紹介します。

## ■スキャノの撮り直し

スキャノを撮影した後、もう一度スキャノを撮り直したい場合、以下の手順で再撮影ができます。

- ①[Quit Exam]をクリックして患者登録画面へ戻る
- ②[Scan Plan]をクリックして、黄色から白色へ変更させる  
※V4.61～では回転停止の[Stop Rotate]もクリックしておくともスムーズです
- ③もう一度エキスパートプランを起動します



## ■スキャン計画中にAutoview-M (-S) で画像を確認したい

スキャン計画画面で[Scan Plan]をクリックすると、Autoview-M・Raw-dataなどのアイコンが表示されて、別な画面へ移動できるようになります。

※ただし開始ボタンが点灯中は移動できません。






# スキャン計画に役立つ機能 Scan Plan

## ■スキャン計画画面に戻る (V4.40~対応)

スキャン計画終了後、[Confirm]するとスキャン計画線は表示されなくなりますが、[Scan Plan]をクリックすることで、再びスキャン計画画面を起動することができます。単純+造影のEPを使うとき、単純を撮影してからルート確保などの準備の合間に造影のスキャン計画を立てたい場合に便利です。

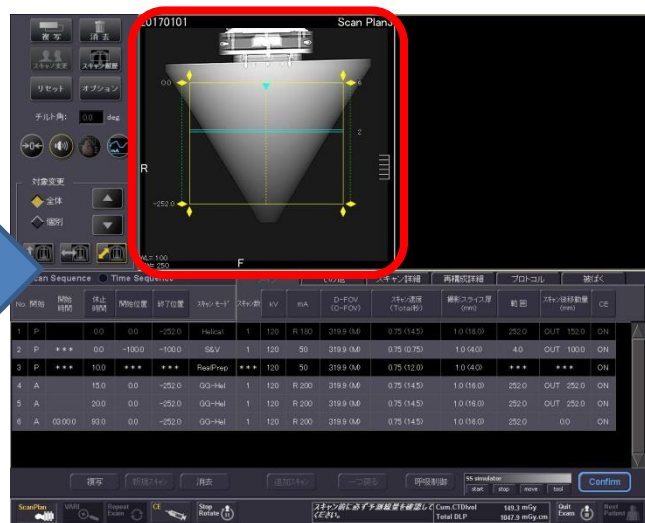

RealPrep使用時には、S&V撮影直前の開始ランプ点灯時に再構成が停止しますが、[Scan Plan]を押すことでスキャン計画画面に戻り、再構成もリスタートさせることができます。

1コンソールで運用されているご施設で、S&V撮影前に撮影した単純画像を確認したい場合に、Scan Planをクリックし、Autoview画面などで画像確認することができます。

以上、[Scan Plan]  3つの機能をご紹介させていただきました。

他にもこんな方法で活用しているというご施設がありましたらぜひ遠友会までご連絡ください！

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。