

# 痒い所に手が届くキヤノンCTのおすすめ機能



## 患者登録時に言語種の設定が可能

キヤノンのCTでは患者登録のときに言語の種類も指定することで、その後選択するエキスパートプランの音声自動的に変更される機能があります。もちろん、この変更は一時的なもので[Next Patient]後は元の言語に戻りますよ。

### ■ 男性音声の選択方法患者登録画面

ソフトウェアのバージョンV8以降では患者登録画面に『言語種』の項目が追加されました。ここでプルダウンから言語種を指定すると、その患者さんの撮影だけエキスパートプランにすべて反映されます！

The screenshot shows the patient registration interface. At the top, there is a field for '患者ID' (Patient ID) with the value '20200831' and an 'Info.' button. Below it is a field for '(姓)スペース(名)' (Last Name Space First Name). The '患者名' (Patient Name) field contains 'Language'. There are fields for '生年月日' (Date of Birth) and '年齢' (Age). A '性別' (Gender) dropdown is set to '男' (Male), and a '体重' (Weight) field is present. The '言語種' (Language) dropdown is highlighted with a red box and is currently set to 'English'. A dropdown menu is open below it, listing options: Japanese, English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Russian, and Japanese2. At the bottom, there are buttons for '予約' (Reservation), '照射録' (Recording), '詳細' (Details), 'Clear', and '救急' (Emergency).

患者登録画面



エキスパートプランのプリセット



言語種指定時

### ■ 患者登録時に言語種の設定が可能な装置一覧

装置	Start	Lightning	Helios	Prime	ONE	Precision
搭載	○	×	○	V8以降		○

※ご使用の装置での仕様に関してはキヤノンCTアプリケーション担当までお問い合わせください。