

痒い所に手が届くキヤノンCTのおすすめ機能





Real Prep 音声先出し機能

CTの撮影時間が短くなり、Bolus Trackingのトリガーからスキャン開始までの時間もできるだけ短くしたいとご要望を受けReal Prep.ではモニタリング中に息止め音声を再生させる機能が搭載されています。

■ 音声出力のタイミングはCT値または時間で指定可能

例えばモニタリングするROIのCT値150HUをトリガーにして本スキャンへ移行させたいとき、もう1つROIをとり80HUになったら強制的に音声を再生させることや、インジェクション開始して15秒後に強制的に音声を再生させることができます。

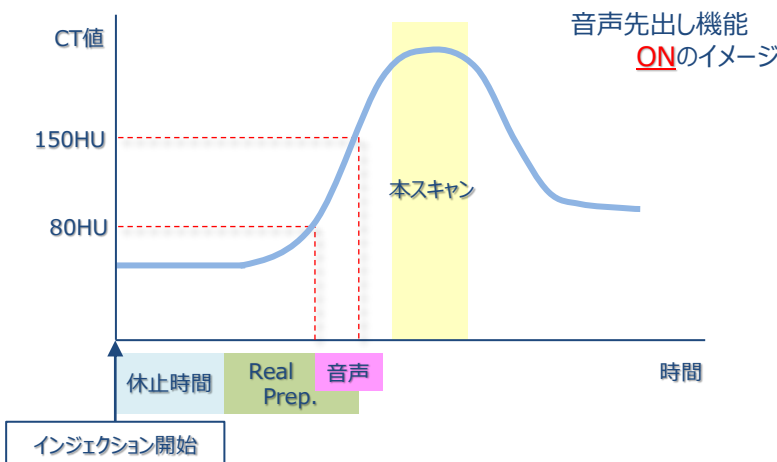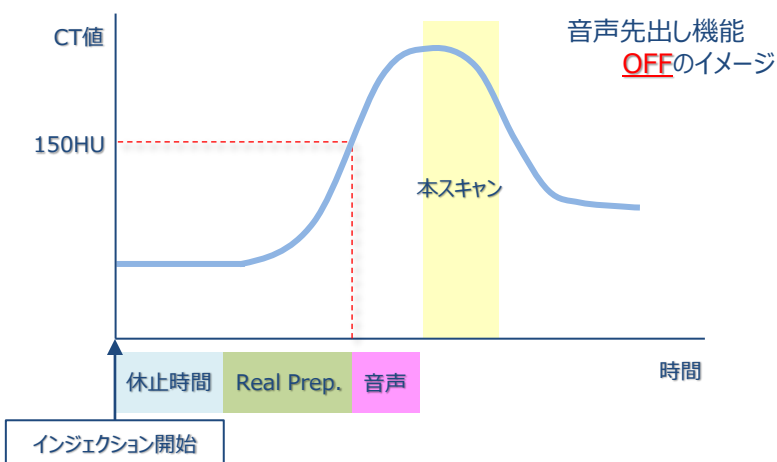

■ 搭載装置・Ver. 一覧

装置	Aquilion Start	Aquilion Lightning	Aquilion Lightning /Helios Edition	Aquilion Prime SP	Aquilion ONE	Aquilion Precision
適用	○	○	○	○	○ (V4.51~)	○

※装置やバージョンにより仕様が異なる場合がございます。
ご使用の装置での仕様に関してはキヤノンCTアプリケーション担当までお問い合わせください。