



# 画像の並び順について

画像の並び順は、スキャンして再構成した後に変更することも、スキャン前に指定することもできます。

## ■スキャン後の並び替え

再構成した画像をImage Selectorにて並び替えを行います。

- ①Image Selectorウィンドウ中、左上の[ファイル]をクリック。
- ②画像の並び順を『寝台位置(+)] 『寝台位置(-)] 『スキャン時刻』から選択します。




※V3.0以降では、並び変えた順番がImage No.へも反映されます。(詳細は次ページ参照ください)

## ■スキャン前の並び替え

それぞれのエキスパートプランに画像の並び順を予め指定して登録することができます。

- ①[ユーティリティ]から[エキスパートプラン]⇒[プリセット]を選択します。
- ②画像の並び順を指定したいエキスパートプランの編集画面に入ります。
- ③[オートソート]をクリック。
- ④表示されたウィンドウからキー項目と、昇順または降順を選択して[OK]をクリックし[Save]してください。

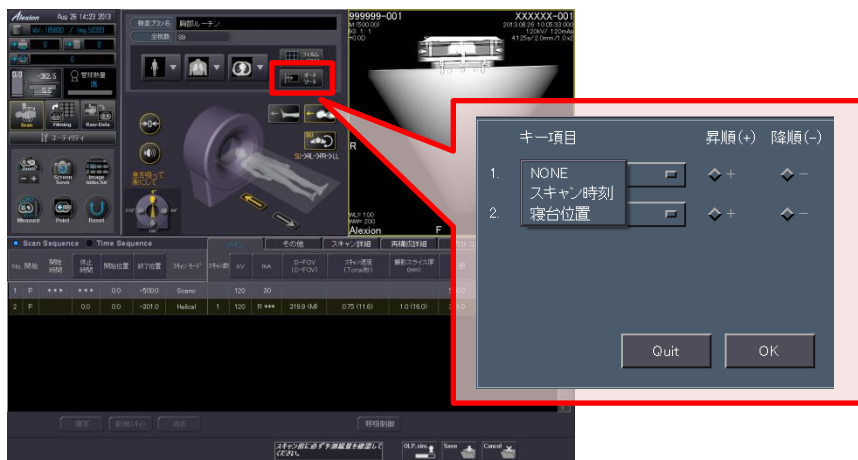

スキャン時刻 昇順(+)  
 スキャン時刻 降順(-)  
 寝台位置 昇順(+)  
 寝台位置 降順(-)  
 の4種類から選択できます。



※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。



スキャン後に画像の並び順を変更する場合、並び順だけではなくImage No.も変わります。


### 【画像上での確認方法】

左上の付帯情報表示エリアに表示されるImage No.が変更されます。

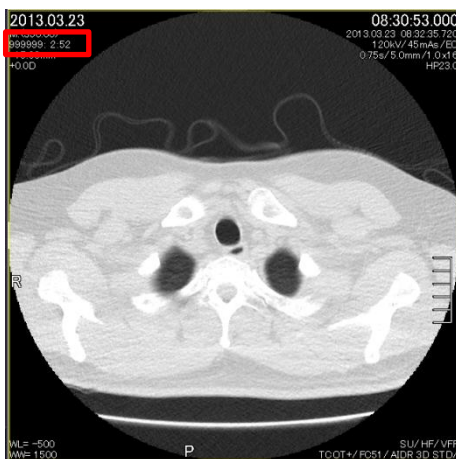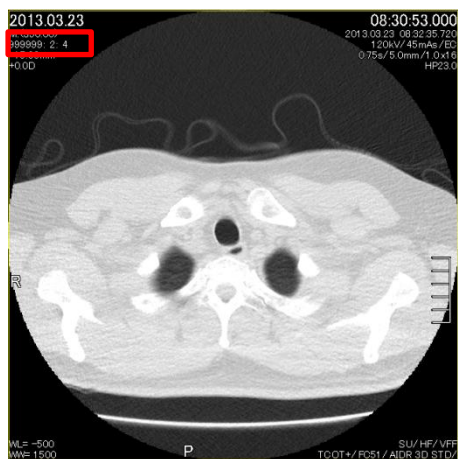

### 【ディレクトリでの確認方法】

画像ディレクトリを表示すると、Image No.も変更されることがわかります。

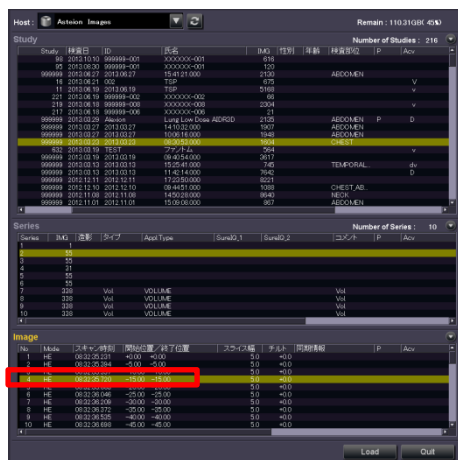

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。