




画像のマウス操作

マウスだけを使って画像のパンやズームを行ったり、キーボードと組み合わせて使用することで画像のローテーションを行うことができます。

※ソフトのVer.がV3.00以降のシステムでご使用いただけます。

◆画像のパン

マウスのホイール（図のW）を押したまま動かします。

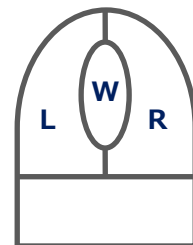

マウス図

◆ウィンドウ条件の変更

マウスの右クリック（図のR）を押したままマウスを動かします。

◆画像のズーム

マウスのホイールと右クリック（図のWとR）を同時に押したままマウスを動かします。

◆画像の高速めくり

マウスの左クリックと右クリック（図のLとR）を同時に押したままマウスを動かします。

◆画像のローテーション


キーボード上のCtrlと右クリック（図のR）を同時に押したままマウスを動かします。

Filming画面はもちろん、MPRや3Dやスキャン計画画面でも使用できます。

※全て画像上にカーソルを置いた状態で操作してください。



MPR画面

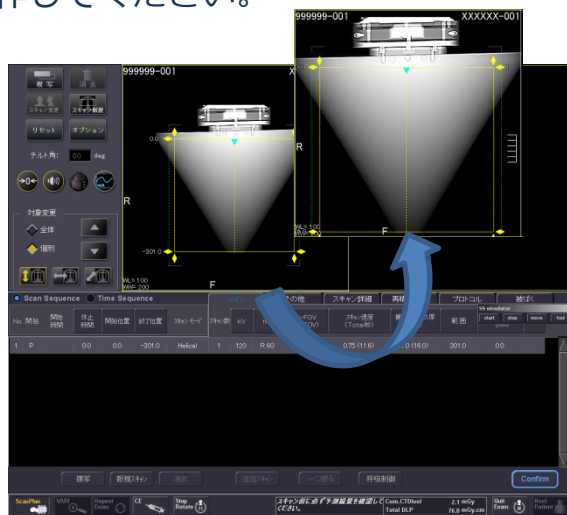

スキャン計画画面

これ以外にも、I-Set上の任意の1コマから右クリック（図のR）を押したままマウスを動かすと、その方向の画像が全て選択される機能もあります。

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。