




複数の生データを1度に再構成

同一Studyに含まれる生データであれば、複数選択して1度に再構成することができます。例えば、3相撮影時にスキャン後に同じ条件で再構成したい場合など便利です。


- ① Raw-Dataから生データの指定をする際、Seriesの階層から複数の生データを選択して[Load]をクリックします。
- ② 生データが読み込まれたら、[生データリスト]をクリックします。表示された生データリストから再度複数シリーズを選択して[OK]をクリックします。
- ③ このあとは通常通り再構成範囲やスライス厚とスライス間隔・SureIQを指定して[再構成実行]してください。

①

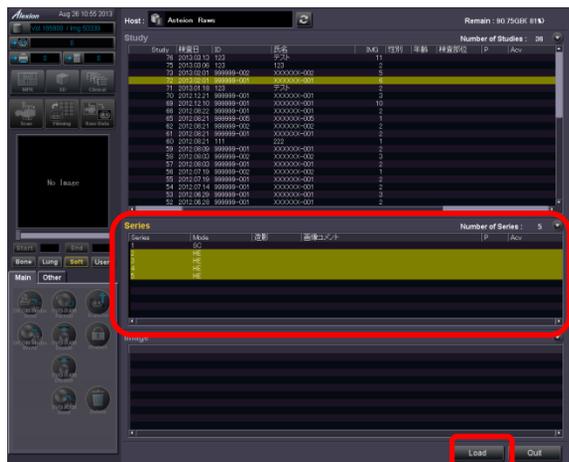

Seriesの階層から再構成したい生データを全て選択

②

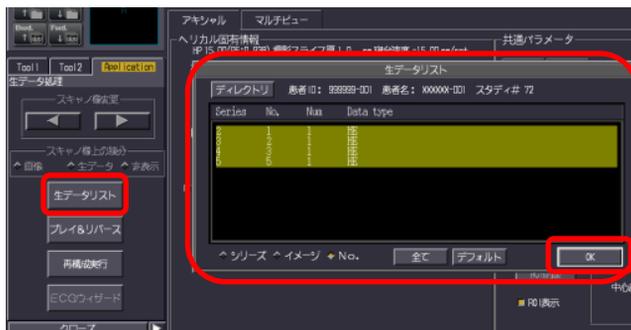

さらに、[生データリスト]を開いてリストから選択

※一括で再構成しても、画像のシリーズが1つに統合されることはありません。

※撮影条件が異なる生データは一括に再構成することはできません。

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。