



画像保存枚数の制限について

画像保存枚数は、装置の最大画像保存枚数の制限のほかに、以下の制限があります。

■ AquilionONE ・ AquilionONE ViSION (V4.93まで)

- ・ Study数 1000件まで
- ・ 1study 30000枚 or 10000volume
- ・ 1シリーズ 4000枚 (VolumeスキャンのVolumeは4000volumeまで)

■ AquilionPRIME Beyond/Focus (V5以上)

- ・ Study数 4000件まで
- ・ 1study 50000枚 or 10000volume
- ・ 1シリーズ 25000枚

■ AquilionPRIME (V4まで)

AquilionCXL ・ AquilionCX ・ Aquilion64 ・ Aquilion4 ・ 8 ・ 16
Activion16 ・ Alexion ・ AsteionSuper4/Premium4 などのMSCT装置

- ・ Study数 1000件まで
- ・ 1study 30000枚 or 10000volume
- ・ 1シリーズ 4000枚

この制限を超えますと再構成がストップしてしまいますのでご注意ください。

再構成キューがHOLD状態になるので、枚数を超えてしまった再構成キューを選んで削除してから、枚数を減らして再構成するようにお願いいたします。



※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより操作が異なる場合がございます。
ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。