



撮影後の患者体位・患者挿入方向の変更方法

患者体位・挿入方向は、撮影後も変更可能です。
撮影後は以下の付帯情報変更画面で変更します。

- ①ユーティリティ→付帯情報変更 をクリックし、変更したい患者さまを選択しLoad をクリックします。
- ②画面右側の「患者体位」「患者挿入方向」を変更し、「登録」をクリックで完了です。

The screenshot shows the 'Information retouch' interface. On the left, there are input fields for patient ID (test), name (テスト), birth date, age, gender, weight, and various scan parameters. On the right, there are tabs for Main, CE, Study, Patient, and Scan. The 'Patient' tab is active, showing options for patient position (Supine, Prone, Right Lateral, Left Lateral) and insertion direction (Head First, Feet First). The '登録' (Register) button is highlighted with a red box.

※画像の付帯情報は変更されますが、画像表示の向きは変更されませんので
変更したい場合は「Rotate (回転)」などで変更し、Batch処理で保存してください。

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより表示・操作が異なる場合がございます。
ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。