



分かれてしまったStudyを統合するには？

途中でNext Patientを押してしまい、一人の患者さまが2つのStudyに分かれてしまった。それにより

- ・一枚のフィルムに読み込みできない。
- ・Colon viewingで仰臥位・腹臥位を一緒に解析できない。
- ・MyoPerfusionでStress・Restを一緒に解析できない。

などの理由で一つのStudyに統合したい場合の方法をご紹介します。

- ①ユーティリティ→付帯情報変更 をクリックします。
- ②分かれてしまったStudyを二つ選択してLoad (OK) をクリックします。(別患者を選ばないようにご注意ください)

Study								N
Study	検査日	ID	氏名	IMG	性別	年齢	検査部位	
5	2013.06.11	12345	トウシバ タロウ	2	M	63Y		
4	2013.06.11	12345	トウシバ タロウ	2	M	63Y		
3	2013.06.11	999999-001	XXXXXXXX-001	2				
2	2013.05.27	999999-002	XXXXXXXX-002	89				
1	2013.05.27	999999-001	XXXXXXXX-001	3644				
7	2013.04.04	Aquillon	TOSHIBA	1				
999999	2013.04.04	Aquillon	Whole-Body-Perfusion	12374			LL-CTP	

- ③表示されている名前で問題ないことを確認し、スタディ発番をクリックします。
- ④登録をクリックします。 → 一つのStudyに統合されます。

Information retouch

患者ID 12345

患者名 トウシバ タロウ

生年月日 1950.01.01 年齢 63Y

性別 M 体重 ke

患者コメント

造影剤

検査部位

詳細

Main CE Scan

患者体位:

- Supine
- Prone
- Right Lateral
- Left Lateral

患者挿入方向:

- Head First
- Feet First

スタディ発番: ON ③

シリーズ発番: OFF

Quit 登録 ④

※統合後のシリーズ番号が重複する可能性がありますので、PACSなどへの転送はシリーズ発番や、メルマガ3号に記載したBatch処理を使用して発番してください。

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより表示が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。